

AC-011 のメンテナンス




日常のお手入れ

フィルターユニットは、唾液やその他の汚れ等で水蒸気がたまる原因になるので1日に1度分解し洗浄してください。

フィルターユニット分解方法

フィルターユニット本体の上下にあるキャップの隙間にマイナスドライバー等を差し込みスライドすると分解できます。
(分解時には白い玉が入っていますのでなくさないようにご注意ください)

各パーツを中性洗剤などで洗浄し、よく乾燥させた後、組み立ててご使用ください。

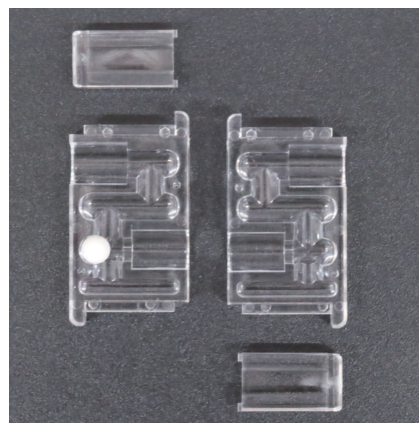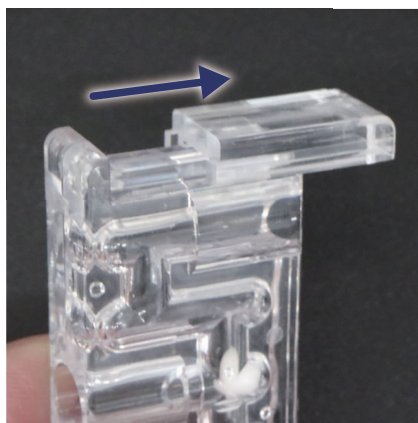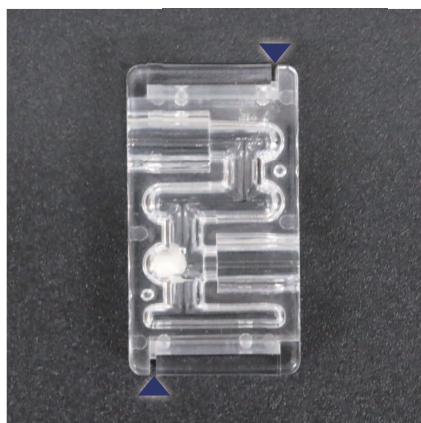

フィルターユニット取り付け

フィルターユニットは必ずストロー差し込み口が下側(写真の向き)になるようにを取り付けて下さい。



株式会社東洋マーク製作所

大阪本社：072-924-0811 FAX 番号：072-924-0812

東京支社：03-3803-7213 FAX 番号：03-3803-7214